

## 如何使用「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」？

初次使用前，大約需要 3-4 次按壓，直到可以噴出。之後，瓶身就準備好供所有後續使用。請在使用「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」之前卸妝。

如果您想處理發紅和受刺激的眼瞼，請按照以下方式使用「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」：



- 將瓶身保持在離眼睛約 10 厘米的距離。
- 閉上您的眼睛。
- 對閉合的眼瞼噴灑 1-2 次「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」。
- 重要提示：請不要將噴霧直接噴灑到睜開的眼睛上。並且不要用噴嘴觸摸眼球或眼睛表面。

如果您想清除眼瞼上或睫毛之間的沉積污垢，或者進行眼瞼邊緣清潔，有兩種應用方法：

### 1. 使用棉花棒並噴灑到眼睛上：



- 用「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」濕潤一根棉花棒。
- 將「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」噴灑到閉合的眼睛上。
- 用濕潤的棉花棒按摩眼瞼邊緣，先從上眼瞼的上部到下部，然後再從下眼瞼的下部到上部，覆蓋整個眼瞼。
- 輕輕由外眼角向內眼角擦拭。棉花棒只能使用一次。
- 最後，用濕潤的棉墊或可用「倍視明眼瞼清潔棉片」清潔眼瞼邊緣。
- 為了清潔眼瞼邊緣，應將棉墊沿著眼瞼由外向內擦拭。
- 適合 3 歲或以上兒童或成人使用。

### 2. 使用棉墊的應用方法：



- 將「倍視明眼瞼除菌潔淨噴霧」噴灑到棉墊上，直到足夠濕潤。
- 為了清潔眼瞼邊緣，應將棉墊沿著眼瞼由外向內擦拭。
- 適合 3 歲或以上兒童或成人使用。